

Upustvo za upotrebu AKMA akupunkturnih magneta



1.1 Osobine AKMA magneta

Akupunktorni magneti AKMA su terapijsko sredstvo za blagu i dugotrajnu površinsku stimulaciju bioaktivnih (akupunkturnih) tačaka kože. Gustina magnetnog fluksa na površini magneta je 60mT. Dubina dejstva magneta ϕ 6mm je do 10mm, a magneta ϕ 3mm je do 5mm.

Stimulacijom kožnih nervnih receptora pomoću magneta pokreću se refleksni neuro-humoralni mehanizmi i na fiziološki način utiče se na uspostavljanje poremećenih funkcija organizma.

1.2 Prednosti magneta

Primena magneta je jednostavna, efikasna. Kao površinska neinvazivna metoda stimulacije pogodna je za upotrebu kod svih pacijenata. Naročito je pogodna za primenu kod dece i aksioznih (plašljivih) osoba.

Upotrebom magneta u refleksoterapiji reducira se uzimanje lekova, izbegava se pojava alergije od lekova, smanjuju se lekarske posete i može se koristiti, uz obuku, u vidu samopomoći.

1.3 Indikacije

Indikacije za terapijsku stimulaciju magnetima su različita stanja i subjektivne tegobe. Aktivno se stimulišu odgovarajuće tačke prema priloženoj šemi.

1.4 Kontraindikacije

Kontraindikacije za primenu magneta su relativne, to su pre svega dermatiti i furunkuli u predelu izabrane bioaktivne tačke i alergija na flaster. Sami magneti su međutim hemijski neaktivni i otporni na hemijske supstance i spoljna dejstva.



1.5 Metod rada

Prema indikacijama a na osnovu priložene šeme izvrši se izbor lokaliteta. Pre stavljanja magneta se koža na mestima izabranih lokaliteta očisti alkoholom i osuši. Magneti odabrani po veličini na osnovu šeme, pre stavljanja na kožu zalepe se svojom **zaravnjenom** površinom ("S" magnetni pol) na flaster i potom prislanjaju na kožu uz mali pritisak prstima, tako da **ispupčena** površina magneta ("N" magnetni pol) i cela lepljiva površina flastera dobro nalegnu na kožu.

Promena lokaliteta magneta vrši se na 5 do 7 dana do uspostavljanja zadovoljavajuće funkcije.

Proizvod je klinički ispitivan i atestiran od strane VMA, broj 1600_2/83.

Proizvodi Institut Mihajlo Pupin, Volgina 15, 11000 Beograd, Srbija.

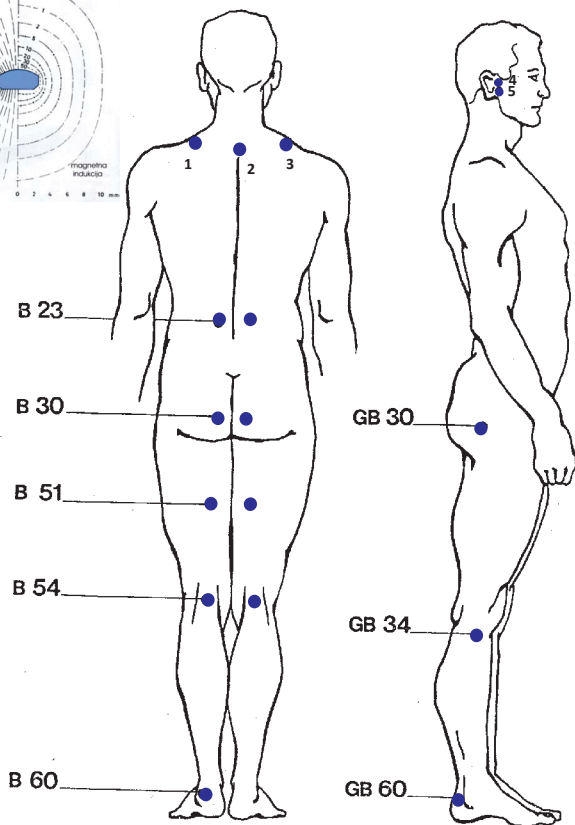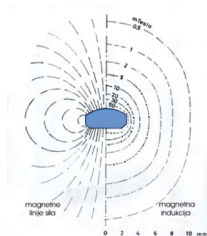

Napomena:

Akupunkturne tačke na telu su simetrične!

Na primer:

Tačke navedene na levoj strani tela simetrično postoje i na desnoj strani tela, ruke, noge

