



MAGMAX[®]
Budućnost Bez Bolova !

MAGNETNI SISTEM ZA RAMENO LOPATIČNU REGIJU



USPEŠNO UBLAŽAVA TEGOBE I BOLOVE NASTALE USLED:

MIŠIĆNIH SPAZAMA
OSTEOPOROZE
REUME I SPONDILOZE
POREMEĆENE CIRKULACIJE

**26 magneta
600 Gauss**



MAGMAX[®]
Budućnost Bez Bolova !

MAGNETNI SISTEM ZA RAMENO LOPATIČNU REGIJU

KAKO DELUJE:

Ovakvom magnetnom stimulacijom ostvaren je kombinovani efekat dejstva statičkog magnetnog polja i stimulacije akupunkturnih tačaka. Dolazi do značajnog poboljšanja cirkulacije, opuštanja mišića, gubitka bola i pozitivnog uticaja na opšte zdravstveno stanje.

NAČIN PRIMENE:

Specijalno konstruisan način pričvršćenja ovog magnetnog sistema obezbeđuje kontinuirano prijanjanje uz kožu i lako nošenje. U zavisnosti od intenziteta bolova, preporučuje se nošenje max 7 dana bez prekida a po potrebi uz pauzu 2 dana ponoviti nošenje narednih 7 dana. Nisu zabeležene nikakve negativne pojave pri dužoj primeni ovakvog magnetnog sistema.

NE PRIMENJIVATI:

Stimulacija statičkim magnetnim poljem ne primenjuje se u slučajevima trudnoće, kancera, prisustva polipa kao i elektro stimulatora (Pacemaker) u zoni dejstva magnetnog polja.

DALI MOŽE DA ŠTETI ?

U našim magnetnim sistemima intenzitet magnetnog polja primenjenih konusnih bio-magneta iznosi 600-700 Gauss (60-70 mT) i kao takav, saglasno normativima Svetske Zdravstvene organizacije, totalno je neškodljiv po ljudsko zdravlje.

NAČIN ODRŽAVANJA:

Ručno pranje na 30-40 C i sušenja na vazduhu.

Ovaj proizvod ne predstavlja medicinsko sredstvo niti lek.

Proizvod je zaštićen zakonom o intelektualnoj svojini. Svaka zloupotreba podleže zakonskoj regulativi.

PROIZVODI:

Institut Mihajlo Pupin,
11060 Beograd ul. Volgina 15

Telefoni: (011) 6773.698

(011) 6771.373

Fax: (011) 6774.720

e-mail: magmax@pupin.rs



www.magnetipupin.rs